

SANGLE HAMAC SANS CROISEMENT

Évite la constriction des hanches.

La forme Hamac percée évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Les jambières en mousse équipant ce modèle jersey et filet confort réduisent les pressions exercées sur les cuisses. Cette sangle évite la constriction des hanches et est adaptée pour les amputés courts. Chaque jambe est prise indépendamment.

- Avec jambières en mousse
- Disponible en jersey confort et en filet confort
- Tailles S, M, L, XL.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient.

Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage vert) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DECROISE

Choix conseillé



CROISE ENTRE LES JAMBES

Choix secondaire

TÊTIÈRE (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en option.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SUCPEHA2-PF (jersey confort) SUCBAHA2-PF (filet confort)
OPTION	TAAT-PF (tête à attaches) TAMOV-PF (tête amovible)