

# RAMASSAGE AU SOL

## Sangles compatibles

NAUSICAA Médical vous propose deux types de sangles pour pouvoir effectuer un ramassage au sol :

- Sangles hamac
- Sangles en U



Lors d'un ramassage au sol, il convient :

- De sécuriser la nuque du patient à l'aide d'une tête rigide ou d'une tête à attaches.
- Si la sangle ne dispose pas de tête, il faut accompagner la nuque du patient avec sa main.
- La tête du patient doit être à l'opposé du mât évitant ainsi les chocs lors du levage.
- Pour faciliter le passage des pieds du lève-personne, ils doivent être écartés, le premier le long du corps et le second sous la pliature des deux genoux.



DÉMONSTRATION VIDÉO

SCANNEZ  
MOI

