

SANGLE EN U PREMIUM JERSEY

La forme en U évite le placement de ces sangles sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.

La mousse confort dans les jambières réduit le cisaillement.
Cette sangle ne doit pas rester sous le patient.

- Disponible en jersey et jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position assise, nous conseillons de régler la sangle le plus court possible aux épaules (réglage jaune) et le plus long possible aux jambes (réglage noir).

POSITIONNEMENT DES SANGLES



CROISÉ ENTRE LES JAMBES

Choix conseillé



CROISÉ SOUS LES JAMBES

Choix secondaire



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE

TÊTIÈRE (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en option.



RÉF.	SUBAS2-PF- (jersey) SUCBAS2-PF- (jersey confort)
OPTION	TAAT-PF (tête à attaches) TAMOV-PF (tête amovible)