

FICHE PRODUIT

VERTICALISATEUR **BLUE WAYUP 3 COMPACT SECABLE**

Descriptif :



- Chassis acier
- Tôles découpe laser et pliage, tubes et profilés
- Peinture époxy au four
- Roues à roulement à billes
- Poids total version compact : 28 kg
- Poids de la partie haute : 16,40 kg (avec un axe et deux molettes)
- Poids de l'embase : 11,60 kg (avec l'autre axe et deux molettes)
- Charge maximale : 150 kg
- Durée de vie du produit : 8 ans* (hors partie électrique)
- * Sous condition d'un entretien régulier
- Batterie lithium : 2 ans de garantie
- Batterie plomb : 1 an de garantie


- Dispositifs médicaux (règlement (UE) 2017/745)
- Compatibilité électromagnétique
- Conformité aux normes suivantes :
 - NF EN 60601-1 : A1/2013
 - NF EN 60601-1-2 : 2015
 - NF EN ISO 10535 : 2021
- Moteur à courant continu basse tension 24V
- Puissance 24 V/120 VA
- Force de poussée maximale : 6 000 N
- Protection électronique en cas de surcharge
- Classe de protection : II
- Type de protection : IP X4
- Arrêts de fin de course par contacteur
- Boîtier en ABS
- Télécommande à câble spiralé, faible tension 24V
- Protection contre les surcharges par thermostats
- Niveau sonore : 60 dB à 1 mètre

Caractéristiques techniques motorisation :

- Boîtier de contrôle avec batterie intégrée
- Affichage par voyant lumineux de l'autonomie
- Cordon Secteur
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Télécommande 2 fonctions Protection IPX4
- Descente d'Urgence : Électrique & Manuelle
- Branchement cordon secteur pour charge de la batterie

Caractéristiques dimensionnelles :

- A.** Longueur totale : 91,5 cm
- B.** Hauteur utile mini : 77 cm
- C.** Hauteur utile maxi : 116 cm
- D.** Hauteur totale : 94,5 cm
- E.** Hauteur du châssis : 8 cm
- F.** Largeur embase mini : 39 cm
- G.** Largeur embase maxi : 60,5 cm
- H.** Diamètre de giration : 89 cm

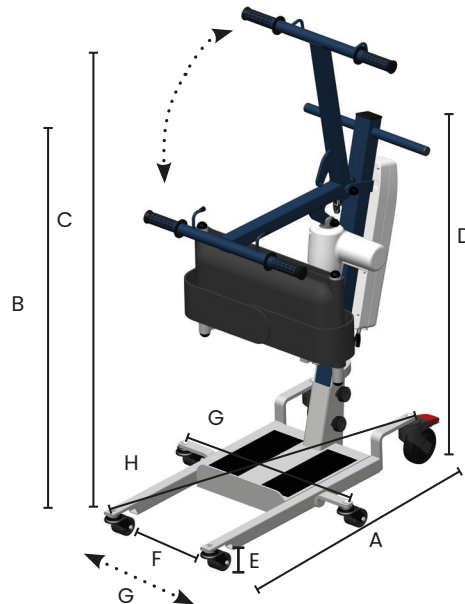

Stockage :

Afin d'optimiser la place dans vos entrepôts, nous vous proposons de rendre votre appareil plus compact lors de son stockage. Pour cela, veuillez suivre les étapes ci-dessous :

- Monter le bras de votre verticalisateur d'environ 5 cm à l'aide de la télécommande.
- Desserer la vis de maintien et baisser le mât de votre verticalisateur vers le sol.



- Insérer une feuille de papier ou carton entre le repose-pieds et l'appui-tibia afin que l'antidérapant du repose-pieds n'abîme pas le textile de l'appui-tibia.
- Passer la sangle velcro de votre appui-tibia sous le repose-pieds afin que l'appareil reste fermé lors de son stockage debout.

