



www.nausicaa-medical.com

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage et le bon état de l'autoagrippant.

ATTACHES



ATTACHE DE POIGNETS

USAGE : MAINTIEN LÉGER DES POIGNETS POUR PATIENT PEU AGITÉ



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
ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ

USAGE : MAINTIEN FORT DES POIGNETS POUR PATIENT AGITÉ



ATTACHE DE CHEVILLES

USAGE : MAINTIEN DES CHEVILLES SUR LE MATELAS ÉVITANT QU'ELLES NE S'ENTRECHOQUENT



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne.

En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



LMATPO2-PF / LMATPOS2-PF / LMATCH2-PF

v 05.02/23

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis en contact direct d'une peau lésée.



ATTACHES

Composition :

ATTACHE DE POIGNETS
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

Composition :

ATTACHE DE POIGNETS
DE SÉCURITÉ
Jersey coton polyester doublé de mousse
polyuréthane
Auto-agrippant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

Composition :

ATTACHE DE CHEVILLES
Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Sangle 100 % polyester
Boucle nylon

à n'utiliser que pour l'usage indiqué :

ATTACHE DE POIGNETS

USAGE : MAINTIEN LÉGER DES POIGNETS POUR PATIENT PEU AGITÉ

Mettre le poignet, côté fourrure, dans le bracelet.

A l'aide de l'auto-agrippant, fermer le bracelet.

Passer la sangle autour de l'objet servant de fixation à l'attache-poignet.

Régler la longueur de la sangle avec la boucle nylon.

ATTACHE DE POIGNETS DE SÉCURITÉ

USAGE : MAINTIEN FORT DES POIGNETS POUR PATIENT AGITÉ

- Passer la sangle se trouvant à l'extrémité pointue du bracelet, dans la fente (1).
- Faire passer le poignet de la personne à travers cette boucle (2).
- Ajuster à la taille du poignet à immobiliser, et fermer le bracelet à l'aide de l'auto-agrippant. Puis passer cette sangle dans la boucle (2).
- Nouer les sangles autour de l'objet servant de fixation à l'attache-poignet.



ATTACHE DE CHEVILLES

USAGE : MAINTIEN DES CHEVILLES SUR LE MATELAS ÉVITANT QU'ELLES NE S'ENTRECHOQUENT

Mettre chaque cheville, côté fourrure, dans chaque bracelet.

A l'aide de l'auto-agrippant, fermer chaque bracelet.

Passer la sangle autour de l'objet servant de fixation à l'attache-cheville.

Régler la longueur de la sangle avec la boucle nylon.