



Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

CEINTURE DE RELEVAGE

À N'UTILISER QUE
POUR L'USAGE INDIQUÉ :
AIDE AU RELEVAGE D'UNE
PERSONNE ASSISE

Composition
Enduction de polyuréthane
sur jersey de polyester
Mousse PE 100 kg/m3
Sangles 100 % polyester
Tissus 100 % polyester



- Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de travail pour le personnel soignant.
- La Ceinture de Relevage s'utilise pour relever une personne assise et préserve le soignant des mauvaises postures au cours des transferts manuels limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.
- L'intérieur est en enduction de polyuréthane antidérapant.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



CREL-PF