

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche)

DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES



L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



DTR-PF

v 05.02/23



DRAPS DE GLISSE AVEC POIGNÉES

Composition
Chaine et trame 100 % polyamide
Enduction silicone 1 face
Poignées 100 % polyester

DESCRIPTION

- Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse avec Poignées est un dispositif qui facilite la translation latérale et verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques
- L'addition des poignées et l'effet de glisse facilitent le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.
- Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique (polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone), les deux faces de tissu en contact coulissant l'une sur l'autre.

EXEMPLE D'UTILISATION

