



www.nausicaa-medical.com

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage.

DRAPS DE GLISSE



Pour la manipulation d'un patient, les Draps de Glisse sont des dispositifs qui facilitent la translation d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les risques de maux de dos et les troubles musculosquelettiques aux soignants.



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



DGL-PF

v 05.02/23



DRAPS DE GLISSE

Composition
Chaîne et trame 100 % polyamide
Enduction silicone 1 face

DESCRIPTION

- Les transferts manuels du patient font partie intégrante de la journée de travail pour le personnel soignant.
- Pour la manipulation d'un patient, le Drap de Glisse est un dispositif qui facilite la translation latérale et/ou verticale ainsi que le rehaussement d'un patient allongé dans un lit, limitant ainsi les maux de dos et les troubles musculosquelettiques.
- L'effet de glisse facilite le travail du personnel soignant en réduisant les frottements dus au poids du patient pendant les manipulations.
- Il est composé d'un tube en polyester de tissu synthétique (polyamide avec enduction polyuréthane traitée silicone), les deux faces de tissu en contact coulissant l'une sur l'autre.

EXEMPLE D'UTILISATION

