

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage et le bon état de l'autoagrippant.

MAINTIEN DE PIED

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


L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



Le Maintien de Pied permet de maintenir le pied sur la palette du fauteuil.



LMDP-HP-PF

v 05.02/23

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



MAINTIEN DE PIED

Composition

Jersey enduit de polyuréthane doublé de mousse
polyuréthane

Biais 100 % polyester

Auto-agrippant 100 % polyester

Mousse PU 100 kg/m³

- Fixer chaque maintien de pieds sur chaque palette du fauteuil roulant avec l'auto-agrippant de la semelle du maintien de pied.
- Poser chaque pied du patient dans un maintien de pied.
- Refermer le maintien de pied sur le pied du patient avec l'auto-agrippant.

