

Ce dispositif médical est destiné au maintien et au positionnement du patient. Ce n'est pas un système de contention. Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.

PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT




PROBAR-M



PROBAR-L


HOUSSES M1

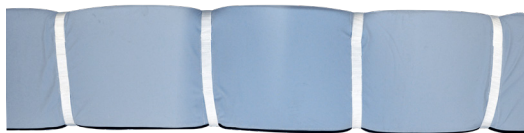

Mousse déhoussable

Les protections en mousse s'installent sur les barrières de lit évitant ainsi au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières ce qui le protège du contact avec le métal.

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La fixation rapide et facile aux barrières de lit se fait avec des boucles rapides (25 mm). La housse amovible en protectlaine est classée au feu M1.



PROBAR-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative. Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



PROTECTIONS DE BARRIÈRES DE LIT

Composition
Jersey polyester enduit de PVC
classé au feu M1
Mousse PE
Sangles 100 % polyester
Boucles nylon

Ces protections en mousse s'installent sur les barrières de lit.

Elles évitent au patient de se cogner et de passer les membres au travers des barrières, le protégeant ainsi du contact avec le métal.

Housse classée M1 et mousse déhoussable.

Fixations aux barrières par boucles rapides 25 mm.

- Placer les protections à l'intérieur de la barrière, fermeture à glissière en bas contre le matelas.
- Fermer les sangles, en les ajustant "tendues" autour des tubes des barrières.
- Contrôler si les protections sont bien ajustées aux barrières, sans possibilité de tourner autour.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyage par surfacage avec une chiffonnette à l'eau tiède savonneuse.
Désinfection par surfacage avec tous produits utilisés en milieu hospitalier.

Lavage des housses seules :
Ne jamais laver les housses avec la mousse (voir recto).