

[www.nausicaa-medical.com](http://www.nausicaa-medical.com)

Ce dispositif est prévu pour les lève-personnes et les lève-personnes fixés au plafond permettant de transférer une personne en position assise. Il est compatible avec les lève-personnes pourvu d'un système d'accrochage par crochet lisse, ouvert ou fermé, étant capable de recevoir une sangle de largeur 40 mm sans impacter la résistance de la sangle sur des fléaux allant de 2 à 4 points, ce qui exclut l'accrochage avec platine métallique à trou.

## SANGLE EN U ENVELOPPANTE



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
La tête intégrée baignée et la forme enveloppante de cette sangle est recommandée pour les transferts de patients agités et anxieux.

Sa forme en U évite le placement de la sangle sous les fesses du patient, rendant ainsi la mise en place et le retrait plus agréable pour le patient et plus simple pour le soignant.

Le positionnement des accroches au niveau des épaules, parcourant toute la partie dorsale de la sangle, évite le phénomène de compression du patient lors du transfert.



Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, les piqûres des sangles : qu'elles ne s'effilochent pas ou ne se défont pas, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage (tissus et sangles d'accroche), que les boucles ne sont pas fissurées ou ne présentent pas de faiblesses d'attaches.



SLK-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne.

En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23

## Recommandations importantes


- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
  - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
  - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



# SANGLE EN U ENVELOPPANTE

## TAILLE & DIMENSIONS (en cm)

|           |   |            |
|-----------|---|------------|
| <b>S</b>  | A | <b>60</b>  |
|           | B | <b>85</b>  |
|           | C | <b>97</b>  |
| <b>M</b>  | A | <b>73</b>  |
|           | B | <b>90</b>  |
|           | C | <b>110</b> |
| <b>L</b>  | A | <b>74</b>  |
|           | B | <b>94</b>  |
|           | C | <b>124</b> |
| <b>XL</b> | A | <b>77</b>  |
|           | B | <b>102</b> |
|           | C | <b>136</b> |

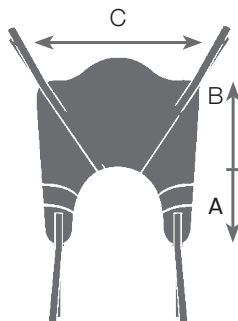

### Composition

Tissu 100% polyester ou vinyle armé  
Sangle polyester 40 mm 1450 DaN  
Mousse PE 50 kg/m3  
Baleinage aluminium 15x3 mm  
Biais polyester 40 mm

Le dossierer de ce type de sangle est constitué par la partie large de la sangle.

Les supports des cuisses, quant à eux, sont constitués par les branches du U.

La sangle avec dossierer et filet de rétention dispose d'un système d'accrochage au fléau du lève-personne en quatre attaches haute et basse :

2, de part et d'autre du dossierer

1, à chaque extrémité des supports de cuisse.

Positionner le bas du dossierer au niveau du coccyx afin que les oreilles du système d'accrochage soient de part et d'autre de la personne. En soulevant légèrement la jambe droite de la personne, faites passer le support de cuisse droit sous la cuisse droite. Procéder de la même manière pour la jambe gauche. Ne pas croiser les attaches du support de cuisse. Accrocher les deux attaches du dossierer et les deux attaches du support de cuisse au fléau du lève-personne.

**RÉGLAGES :** Le système d'accrochage, par attache multiples, permet de faire varier la position assise de la personne.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

Lire la notice d'utilisation avant de mettre en oeuvre les sangles.

Toujours accrocher au fléau du lève-personnes, les oreilles se trouvant au même niveau.

Ne jamais modifier le réglage des oreilles d'accrochage, au fléau du lève-personnes, lorsqu'une personne est installée dans la sangle.

Avant de soulever une personne avec le lève-malade, s'assurer que la sangle soit bien accrochée au fléau.