

Avant chaque utilisation, il est important de vérifier : la présence de l'étiquette, que le dispositif ne présente pas de déchirures, d'accrocs, de trous ni de signes d'effilochage et le bon état de l'autoagrippant.

TALONNIÈRES

POUR TOUS FAUTEUILS



TALONNIÈRE PETIT MODÈLE

USAGE :
AIDE À LA PRÉVENTION
DE L'ESCARRE DU TALON

OBJECTIF :

- Elles protègent des frottements sur les talons et les malléoles.

Ces Talonnières (petit modèle et grand modèle) permettent d'envelopper le pied dans un revêtement en fourrure synthétique, permettant ainsi de prévenir les frottements sur la peau et de soulager les points de pression.



TALONNIÈRE GRAND MODÈLE

USAGE :
AIDE À LA PRÉVENTION
DE L'ESCARRE DU TALON



LM2TAL-PF



L'usage du dispositif nécessite obligatoirement la présence et la vigilance d'une tierce personne. En cas d'utilisation par une personne agitée ou désorientée, la surveillance devient impérative.

Ce dispositif médical doit être mis en oeuvre ou faire l'objet d'une formation par un professionnel de santé.



v 05.02/23

Recommandations importantes

- Afin d'assurer un maximum d'efficacité à l'utilisation des produits de cette gamme, il est indispensable :
 - de choisir la taille adéquate en fonction du patient
 - d'ajuster au mieux le produit sur le patient
- Ces produits ne doivent pas être mis au contact direct d'une peau lésée.



TALONNIÈRES

Composition

Jersey coton polyester doublé
de mousse polyuréthane
Fourrure 100 % polyester
Auto-agrippant 100 % polyester
Biais 100 % coton

- Mettre le talon, côté fourrure, bien au creux de la talonnière.
- Fermer la talonnière sur le pied à l'aide du ou des auto-agrippants.