

SANGLE HAMAC PREMIUM JERSEY

Sa coupe simple et échancrée sur les côtés font d'elle une sangle à privilégier pour laisser sous le patient au fauteuil, car elles ne présentent pas de surépaisseurs et de plis qui favorisent les escarres et l'inconfort.

Cette sangle est proposée en jersey confort avec mousse confort dans les jambières afin de réduire le cisaillement.

La mise en place doit se faire au lit en position allongée à 180° en pratiquant une latéralisation.

Cette sangle peut rester sous le patient.

- Disponible en jersey et en jersey confort
- Tailles S, M, L, XL.

RÉGLAGE DES ACCROCHES



Le système d'accrochage par suspentes multiples permet de faire varier la position du patient. Pour un confort optimal en position semi-allongée nous conseillons de régler la sangle en position intermédiaire sur un réglage jaune aux épaules et noir (ou rouge) au niveau des jambes.

POSITIONNEMENT DES SANGLES



DECROISÉ

Choix conseillé



CROISÉ AU DESSUS DES JAMBES

Choix secondaire

TÊTIÈRE (OPTION)

La tête à attaches (TAAT-PF) et la tête amovible (TAMOV-PF) sont disponibles en option.



CONFORT STYLE BIEN-ÊTRE
FABRICATION FRANÇAISE



RÉF.	SHA2-PF- (jersey) SHAC2-PF- (jersey confort)
OPTION	TAAT-PF (tête à attaches) TAMOV-PF (tête amovible)